

●仕様一覧

品名	HKP-101M 無泡性アルカリ性洗剤	HKP-201M 中性酵素配合洗剤
用途	・ステンレス器具、器材の洗浄 ・医療用チューブ類の洗浄 ・スリッパの洗浄	・ステンレス、ガラス器具の洗浄 ・アルカリ、酸に弱い器具の洗浄
性状	外観：淡黄色透明液体 pH：11.8±1.0（原液）	外観：淡褐色透明液体 pH：7.1±0.5（原液）
使用方法	0.5～1.0%に希釈	0.5～1.0%に希釈
定価	10kg×2本入/1箱 48,000円 4L×4本入/1箱 38,400円	10kg×2本入/1箱 48,000円

品名	HKP-301M 水溶性潤滑防錆剤	HKP-302M DR 水溶性潤滑防錆・乾燥促進剤
用途	・洗浄後の器材の防錆、保護に	・洗浄後の器材の防錆、保護、乾燥促進に
性状	外観：白色懸濁液体 pH：8.9±1.0（原液）	外観：無色透明液体 pH：7.4±1.0（原液）
使用方法	0.2～0.5%に希釈	0.2～0.5%に希釈
定価	10kg×2本入/1箱 48,000円	10kg×2本入/1箱 48,000円

品名	MZ-1 Mayazyme 弱アルカリ性	MZ-2 Mayazyme 中性
用途	・Fun-Souによる洗浄 ・恒温槽による洗浄 ・浸漬洗浄	・Fun-Souによる洗浄 ・恒温槽による洗浄 ・浸漬洗浄
性状	外観：淡黄褐色透明液体 pH：9.4±1.0（原液）	外観：淡黄褐色透明液体 pH：7.2±1.0（原液）
使用方法	1～2%に希釈	1～2%に希釈
定価	2L×6本入/1箱 36,000円	2L×6本入/1箱 36,000円

- ・製品は改良の為、予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
- ・写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。



株式会社
エッチ・ケイ・プランニング

〒816-0811
福岡県春日市春日公園7丁目47番地
TEL 092-588-0303 / FAX 092-588-0304

このカタログの内容は、2013年10月現在のものです。

HKP

医療器具用洗剤

医療器具の様々な洗浄に対応する
充実のラインナップ



確かな洗浄システムを創出する
株式会社 エッチ・ケイ・プランニング

<http://www.hkplanning.co.jp/>

機械洗浄用

アルカリ性



HKP-101M 10kg・4L 無泡性アルカリ性洗浄剤

血液、体液などの蛋白質除去に優れた効果を発揮！
ジェットウォッシャー、超音波洗浄装置に最適！
アルミ器材にも対応したアルカリ性洗浄剤！！

医療器具の洗浄用に開発された、アルカリ性洗浄剤です。
高い洗浄力を持ちながら、無泡性なので、ジェットウォッシャーや超音波洗浄装置などによる洗浄で優れた力を発揮します。

使用方法

ウォッシャーディスインフェクター：0.5～1.0%に希釈して使用してください。

中性



HKP-201M 10kg 無泡性中性洗浄剤

強力酵素剤の効果によりすぐれた洗浄力を発揮！
ジェットウォッシャー、超音波洗浄装置に最適！
器具への影響が少ない中性洗浄剤！

蛋白質分解酵素を主成分に、特殊非イオン界面活性剤を配合した無泡性の中性酵素洗浄剤です。
中央材料室、手術室、病棟などで、ウォッシャーディスインフェクター等の無泡性酵素洗浄剤として特に血液等の汚染に洗浄効果を発揮します。

使用方法

ウォッシャーディスインフェクター：0.5～1.0%に希釈して使用してください。

防錆潤滑剤



HKP-301M 10kg 水溶性潤滑防錆剤

洗浄後の、器材の錆防止効果！
潤滑作用によって滑らかな使用感を保ちます。

ウォッシャーディスインフェクター用に開発された、濃縮潤滑防錆剤です。
乾燥促進効果にも優れています。

使用方法

ウォッシャーディスインフェクター：0.2～0.5%に希釈して使用してください。

乾燥促進
防錆潤滑剤



HKP-302M DR 10kg 水溶性潤滑防錆・乾燥促進剤

洗浄後の器材の、錆防止と潤滑効果！
乾燥促進効果をさらに強化し、作業時間の短縮に貢献！

ウォッシャーディスインフェクター・器械洗浄装置用に開発された水溶性潤滑防錆・乾燥促進剤です。
ウォータースポットが低減されると共に、乾燥時間を短縮できます。

使用方法

ウォッシャーディスインフェクター：0.2～0.5%に希釈して使用してください。

Fun-Sou・浸漬洗浄用

酵素入
アルカリ性



Mayazyme MZ-1 2L 無泡性弱アルカリ性酵素洗浄剤

高力価酵素を配合した、高い洗浄力をもつ弱アルカリ性洗浄
浸漬洗浄に最適！

アルミ器材にも対応したアルカリ性洗浄剤対応！！

Mayazymeは、管状器械専用洗浄機「Fun-Sou」用に開発された浸漬洗浄剤です。
弱アルカリ性でありながら高力価酵素を配合し、高い蛋白質の溶解力を持ちつつ、
器械に与えるダメージは少なくされています。

使用方法

Fun-Sou槽内に200～400mlを計量カップにて注いでください。
恒温槽・浸漬洗浄等では1～2%に希釈して使用してください。
40℃程度の水温で、最も洗浄力を発揮します。

酵素入中性



Mayazyme MZ-2 2L 無泡性中性酵素洗浄剤

高力価酵素を配合した、高い洗浄力をもつ中性洗浄剤！
浸漬洗浄に最適！

器具への影響が少ない中性洗浄剤！！

Mayazymeは、管状器械専用洗浄機「Fun-Sou」用に開発された浸漬洗浄剤です。
高力価酵素を配合した中性洗浄剤であるため、高い蛋白質の溶解力を持ちつつ、器械に
与えるダメージは少なくされています。

使用方法

Fun-Sou槽内に200～400mlを計量カップにて注いでください。
恒温槽・浸漬洗浄等では1～2%に希釈して使用してください。
40℃程度の水温で、最も洗浄力を発揮します。

HKP 洗浄機 シリーズ

HKP洗浄剤の効果を発揮する、高機能を備えた洗浄機ラインナップ

Su-Jet スーパーソニック洗浄装置



- 真空・超音波・吸引・噴射の4機能の組合せにより、高水準の洗浄を実現。
- 蛇管22本、フレキシブルリーマの洗浄18本、硬性内視鏡36本の洗浄が可能。
- 洗浄物の量に応じ、低水位、高水位の2段階切替。

ジェットウォッシャー



- デッドスポットを無くす新型ラック対応
- W/Dにおける機材に対する熱消毒時間：93℃10分を標準装備。
- ご要望に合わせて、洗浄機のサイズ、超音波洗浄の有り無しを選択可能。

管状器械マイクロ器械専用洗浄装置 Fun-Sou



- 管状器械の内腔を確実に洗浄。
- 容易に既存の洗浄システムの中に取り入れることができます。
- マイクロ下手術で使用するマイクロ器械等の浸漬洗浄が可能です。

チューブ洗浄乾燥機



- 気管内チューブ、カテテル類、人工呼吸器の蛇腹管などの洗浄・乾燥を全自動で行います。
- 熱水処理は80℃10分のガイドライン対応。
- 様々な専用ノズルで種類、サイズの異なるチューブを同時に最大40本まで大量処理が可能です。